

## Verkorte handleiding instellen datum en tijd bij een CoaguChek XS

Alle instellingen worden met de **Set**- en de **M**-toets ingevoerd, zoals hieronder beschreven. De **Set**-toets bevindt zich aan de linker zijkant van de meter. De **M**-toets is de linker toets aan de voorzijde van de meter. Door op de **Set**-toets te drukken, komt u in de instelmodus. Dit wordt door het woord "set" op de display weergegeven.


### 1. Instellen van de datumweergave

Het is niet nodig om de meter aan te zetten, druk op de **Set**-toets aan de zijkant.


De eerste stap is het selecteren van de datumweergave ( **datum wordt knipperend op display weergegeven**). De volgende mogelijkheden kunnen worden geselecteerd:

- **31-12-00 (= fabrieksinstelling) dag-maand-jaar** ←
- 12-31-00 maand-dag-jaar
- 00-12-31 jaar-maand-dag


1. Selecteer 31-12-00, door op de **M**-toets te drukken, bevestig dit door op de **Set**-toets te drukken.
2. Hierna gaat het jaartal knipperen op het display

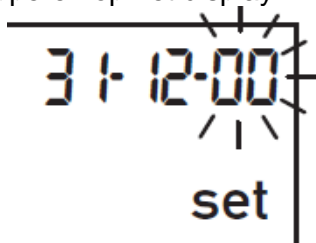

3. Door op de **M**-toets te drukken, stel je het jaartal in.
4. Bevestig dit door op de **Set**-toets te drukken.
5. Daarna gaat kan je de maand instellen

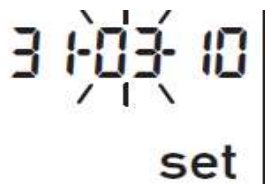

6. Door op de **M**-toets te drukken, stel je de maand in.
7. Bevestig dit door op de **Set**-toets te drukken
8. Daarna kan je de dag instellen

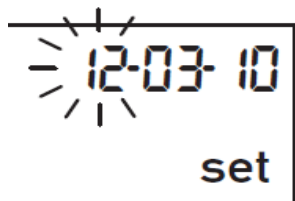


9. Door op de **M**-toets te drukken, stel je de dag in.
10. Bevestig dit door op de **Set**-toets te drukken.


## Verkorte handleiding instellen datum en tijd bij een CoaguChek XS

### 2. Instellen van de tijdsweergave

11. U kunt de weergave van de tijd nu selecteren, hetzij in de internationale weergave (24-uursweergave = fabrieksinstelling), hetzij in de Engels- Amerikaanse weergave (12-uursweergave met de toevoeging “a.m.” of “p.m.”).

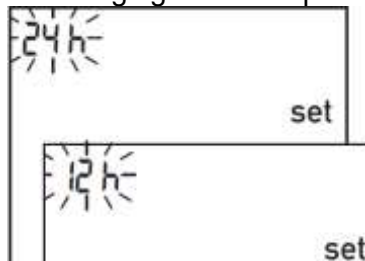

12. Druk op de **M**-toets om tussen de 24-uurs- en de 12-uursweergave te wisselen.  
13. Druk op de **Set**-toets om de gewenste instelling op te slaan en verder te gaan met het instellen van de tijd.  
14. Hierna wordt automatisch de display voor het instellen van de tijd weergegeven.

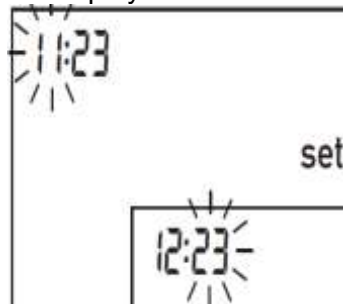

15. Druk op de **M**-toets om het op de display knipperende getal te wijzigen. Nadat u vervolgens op de **Set**-toets heeft gedrukt, kunt u de minuten instellen (opnieuw met de **M**-toets).  
16. Na het instellen van de tijd, kan de meter om de strip vragen. Of meter gaat verder met de volgende instellingen: Het instellen van de eenheid.

### 3. Instellen van de eenheid

Let op de meter kan op 3 verschillende manieren het meetresultaat weergeven. Check altijd even of deze in INR wordt weergegeven (laat de patiënt na het instellen van de meter, deze uitzetten en laat patiënt op **M**-toets drukken

17. Selecteer nu de eenheid, waarin het meetresultaat weergegeven moet worden. U kunt kiezen uit de volgende eenheden:
- %Q
  - Sec
  - **INR (fabrieksinstelling)** ←
18. Selecteer “**INR**”  
19. Op de display knippert “ON / OFF” voor het instellen van het akoestisch signaal.

Als u “INR” als eenheid heeft ingesteld, kunt u nu kiezen voor de aanvullende weergave van de resultaten, die buiten een therapeutisch streefwaardenbereik liggen. Als u deze keuzemogelijkheid heeft ingesteld, wordt er bij meetresultaten boven of onder het ingestelde bereik aanvullend een pijlsymbool op de display weergegeven om u er op te attenderen, dat deze resultaten buiten het streefwaardenbereik liggen.